

HemaGel®

Hydrofilní gel
HemaGel®

By VH Pharma a.s.



ÚČEL POUŽITÍ:

Hydrofilní gel k ošetření povrchových poranění kůže.

PROČ POUŽÍVAT HemaGel® K OŠETŘENÍ RAN?

- chemicky váže kyslíkové radikály, které vznikají v průběhu procesu hojení rány
- kryje ránu před sekundární infekcí z venčí
- utváří na ráně pružnou mechanickou ochrannou vrstvu
- vytváří vhodné prostředí pro granulace včetně snižování sekrece

SLOŽENÍ:

HemaGel® je hydrofilní gel složený z kopolymeru 2-hydroxyethylmetakrylátu obsahujícího polymerně vázané stericky stíněné aminy (HEMA-HAS), makrogolu a čišťené vody (aqua purificata). **HemaGel®** je vyvinutý Ústavem Makromolekulární chemie Akademie věd ČR.

JAK POSTUPOVAT PŘI POUŽITÍ GELU:

- Očistěte ránu od mechanických nečistot, např. částeček prachu, zbytků předchozích léčebných materiálů, které by mohly následně dráždit a poškozovat ránu.
- Rozetřete tenkou vrstvu gelu (cca 1 mm) po celé ploše spodiny rány s mírným přesahem na zdravou pokožku. Gel přilne na spodinu rány a postupně absorbuje sekrety a další tekutiny z rány.
- Ránu překryjte nesavým materiálem (např. mastným tylem dostupným v lékárně) a následně fixujte obinadlem nebo gázovým čtvercem a náplastí. Drobná poranění po nanesení gelu kryjte polštářovou náplastí.
- Účinek gelu se projevuje bobtnáním. Unikátní technologie gelu zabraňuje přilepení k ráně a tím umožňuje i velmi snadné odstranění bez bolesti jemným setřením nebo opláchnutím.
- Převaz provádějte dle potřeby po 12 - 48 hodinách. Vždy dle stavu rány a průsaku sekundárního krytí nebo pokynů ošetřujícího.

CÍLOVÁ SKUPINA A OMEZENÍ POUŽITÍ:

Výrobek je určen pro dospělé pacienty.

Těhotenství a laktace: Z důvodu absence klinických studií spojených s použitím u těhotných a kojících žen je HemaGel možný použít pouze po konzultaci s lékařem.

Použití u dětí: Z důvodu absence klinických studií spojených s použitím u dětí je HemaGel možný použít pouze po konzultaci s lékařem. V případě, že se vyskytne lehké kožní podráždění (např. lehké svědění nebo mírné pálení) u osob se zvýšenou citlivostí nebo po aplikaci na citlivá místa (např. okolo očí), přerušete léčbu a kontaktujte svého lékaře.

UPOZORNĚNÍ:

V případě výskytu vedlejších nežádoucích účinků (zvýšená bolestivost, zarudnutí apod.) přerušete léčbu a kontaktujte ošetřujícího lékaře. Chraňte před dětmi! Pouze pro vnější použití. Nepoužívejte vnitřně! Nepoužívejte po uplynutí expirační doby uvedené na tubě. Nepoužitý prostředek nebo prostředek s prošlou expirací vraťte do lékárny. Použití u dětí, těhotných a kojících se doporučuje po konzultaci s lékařem. Výrobek na ránu aplikujte nejdele po dobu 30 dnů. Použití delší než 30 dnů konzultujte s lékařem. Po každém použití tubu pečlivě uzavřete.

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte v suchu při teplotě 15-25 °C.

BALENÍ:

Tuba 5 g, 30 g, 100 g.

DISTRIBUTOR:

APOTEX (ČR) spol. s.r.o., Na Poříčí 1079/3a, Praha 1, www.apotex.cz.

VÝROBCE:

■ VH Pharma a.s., Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, Česká republika.